



## SCOOTMOBIELEN

**Solo** **Mezzo** **Primo** **Vivo**

  
**Life & Mobility**  
INSPIRED BY LIFE

SLIM OP WEG

# INHOUD



Deze **'Slim op weg' kaarten** helpen u met het gebruik van uw scootmobiel. Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw dealer of met ons via 0314 – 328 000.

Veel plezier met uw scootmobiel!

## OPSTAPPEN

- Draai de stoel zodat u makkelijk op kunt stappen.
- Draai de stoel terug tot deze in de rijpositie 'klikt'.
- Zet het stuur in de gewenste positie.

## RIJDEN

- Zet de contactsleutel op contact.
- Kies de snelheid die past bij de omgeving waarin u rijdt.



## EVEN OPPASSEN MET REMMEN

Zodra u het gas loslaat op de scootmobiel treedt de rem in werking.



## AFSTAPPEN

- Neem de sleutel uit het contact.
- Zet het stuur recht.
- Draai de stoel opzij.
- Stap af.

## HOE VER KUNT U RIJDEN?

De afstand die u met uw scootmobiel kunt rijden op een volle accu noemen we de actieradius. Op deze kaart vindt u de theoretische afstand die is gemeten en die u volgens de norm ISO 7176-4 kunt rijden. In de praktijk is dit anders. De bandenspanning, de leeftijd van de accu, het vervoerde gewicht, de conditie van de weg en het weer zijn allemaal factoren die invloed hebben op de actieradius.



## ONZE RANGE

### SOLO

Topsnelheid: 18 km/u  
Actieradius: tot 70 km

### MEZZO

Topsnelheid: 15 km/u  
Actieradius: tot 50 km

### PRIMO

Topsnelheid: 12 km/u  
Actieradius: tot 40 km

### VIVO

Topsnelheid: 8 km/u  
Actieradius: tot 28 km

## ALGEMENE TIP

Een beetje aandacht houdt de scootmobiel als nieuw.  
Stal de scootmobiel op een overdekte droge plaats.

## ZORG VOOR DE ACCU


Laad de accu's dagelijks op als u veel met de scootmobiel rijdt en om de paar dagen als u weinig rijdt. Dit verlengt de levensduur.

Wilt u specifiek advies voor uw situatie? Vraag dan de dealer!

## CONTROLEER DE BANDEN

Zorg voor een bandenspanning tussen de 2,5 en 3 bar.

- U rijdt dan het meest comfortabel en sturen gaat licht.
- U rijdt dan het meest economisch want de banden slijten het minst.
- U rijdt het verst met een volle accu.

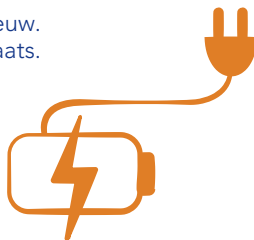

## CHECK DE VERLICHTING

Controleer regelmatig of de verlichting brandt. Laat een defect door de dealer verhelpen.

## REGELMATIG ONDERHOUD

- Gebruik voor onderhoud een mild reinigingsmiddel, zowel voor de bekleding als de gelakte delen.
- Gebruik een zachte borstel voor het verwijderen van vlekken in de bekleding.
- Gebruik een niet schurende auto-was op de lakdelen voor extra bescherming.

## GEBRUIK NOOIT

- een hogedrukreiniger.
- bleek- of schuurmiddelen.
- andere agressieve schoonmaakmiddelen.

## JAARLIJKS ONDERHOUD

Laat de scootmobiel minimaal 1 keer per jaar door een erkende Life & Mobility dealer controleren. Tijdens dit onderhoud worden onder andere de volgende onderdelen van uw scootmobiel nagekeken: de accu, de banden, de remmen, de bekabeling, de stoel en de INDEGO vering.

## ONDERHOUDSBOEKJE

Het onderhoudsboekje van uw scootmobiel zit onder de accukap. Hierin kan de dealer elke servicebeurt noteren en staat ook de datum van aankoop vermeld.

## MOET IK MIJN SCOOTMOBIEL VERZEKEREN?

Voor een scootmobiel is een WA-verzekering verplicht. Er zijn diverse maatschappijen met speciale verzekeringen voor scootmobielen. U heeft geen kenteken nodig, maar wel een verzekeringsplaatje die bevestigd wordt aan de achterzijde van de scootmobiel.

## KAN IK OEFENEN MET MIJN SCOOTMOBIEL?

Dealers en gemeenten bieden rijlessen aan voor de scootmobiel. Deze organisaties doen dat soms in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

## WAT ZIJN NUTTIGE WEBSITES?

Op de website van Veilig Verkeer Nederland vindt u nuttige informatie over het veilig rijden met een scootmobiel. U kunt daar ook de brochure bestellen 'RijWijzer met uw scootmobiel'.

<https://vvn.nl/blijfveiligmobiel>

Veilig Verkeer Nederland biedt op internet ook een test aan voor verkeersregels:

<https://opfriscursus.vvn.nl/v/test>

## WAAR MAG IK MET MIJN SCOOTMOBIEL RIJDEN?

Met een scootmobiel mag u vrijwel overal rijden: op de stoep, het fietspad en de rijbaan. Wel moet u zich aan de snelheidsregels houden. Op de stoep is dat bijvoorbeeld maximaal 6 km/u. Rijdt u op het fietspad dan gelden de regels voor fietsers.

U mag uw scootmobiel wel op de stoep parkeren. Hou er dan wel rekening mee dat deze geen hinder mag veroorzaken voor anderen.

## VERKEERSREGELS SCOOTMOBIEL

Op de website van de overheid vindt u een overzicht van alle regels die gelden voor het rijden met een scootmobiel.

[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)



## REGELS VERLICHTING

U moet overdag bij slecht zicht en 's nachts uw voor- en achterlicht aan hebben. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt.