

# UPDATE

NL - december 2019



## Assortimentswijzigingen per 1 januari 2020

Door constante innovatie verandert ons assortiment regelmatig. Op de volgende pagina's vind je een samenvatting van de assortimentswijzigingen van het afgelopen halfjaar. De aangepaste prijslijsten staan achter de login op de website. Inloggegevens kwijt? Geen probleem, wij verstrekken ze graag opnieuw! Neem contact met ons op via +31 (0)314 - 328 000.


## Newton zitsysteem



Sinds de lancering maken al veel cliënten gebruik van de voordelen van het Newton zitsysteem. Met het hoofd in balans, rompstabiliteit door individuele ondersteuning van de rugcontour en het voorkomen van discomfort, realiseren we met Newton de optimale zithouding voor onze gebruikers. Zo heeft de cliënt meer energie voor de dagelijkse activiteiten en sociale interactie. Newton sluit daarbij volledig aan op een functiegerichte indicatiestelling.

### Online configurator

Een belangrijk onderdeel van het Newton zitsysteem is de online configurator. Hiermee kom je tot de passende Newton oplossing voor jouw cliënt. Via een aantal meerkeuze vragen kom je uit bij de Newton ID, een persoonlijk advies voor de Newton Curve rugleuning en Newton Contour zitting en instelling van het Newton zitsysteem. De configurator wordt dagelijks door veel indiceerders gebruikt, het is een zinvolle hulp tijdens het keuzeproces! [De online configurator vind je hier.](#)

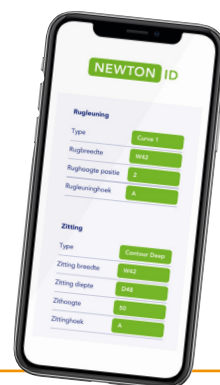

### Afneembare stretchrubber hoes

Voor een optimale hygiënische bescherming van de Newton rugleuning is er vanaf nu een beschermhoes van stretchrubber beschikbaar. Deze is ook te gebruiken in een omgeving waarbij het bijvoorbeeld niet gewenst is dat medebewoners de bedienknoppen op de achterzijde van de Newton rugleuning kunnen verstellen.

De hoes bedekt de rugleuning zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde en kan aangebracht worden terwijl de rugleuning op de rolstoel gemonteerd is.

### Newton op Leon en Morgan

Sinds half september zijn ook de Leon en Morgan bij herverstreking voorzien van het Newton zitsysteem. Daarmee wordt het Newton zitsysteem nu altijd toegepast op de Roxx, Leon en Morgan. De Canto Nxt wordt vooraansnog alleen bij nieuwlevering voorzien van Newton.





**KELVIN**



**Voetkussen Kelvin Classic**

Om een stabiele voetondersteuning voor de gebruikers van de Kelvin Classic beenondersteuning te kunnen bieden, is het voetkussen van deze beenondersteuning aangepast. Door het kussen uit een doorlopend compartiment op te bouwen, zonder naad in het midden, kan de individuele voetpositie beter ondersteund worden. Het aangepaste voetkussen wordt al uitgeleverd.

**Kelvin abductiekussen**

De doorlopende abductie van het Kelvin zitelement voorkomt langdurig contact tussen bijvoorbeeld knieën en enkels, met drukplekken en verhoogde spierspanning tot gevolg.

De vorm van de doorlopende abductie is geoptimaliseerd:

- a. Hogere abductiesteun, zodat het zgn. scharen van de benen van de cliënt voorkomen wordt. De twee compartimenten borgen dat de abductiesteun voldoende steun geeft.
- b. De breedte is versmald, zodat de juiste abductie-ondersteuning geboden wordt.
- c. Versmalde ondersteuning ter hoogte van de onderbenen, waardoor de voeten van de cliënt altijd goed en stabiel in het voetkussen vallen en het naar buiten vallen van de voeten voorkomen wordt.

In het begin van 2020 wordt het geoptimaliseerde abductiekussen geïntroduceerd.




**Soft-start @Ease**

Met de soft-start van de @Ease begeleidersbediening zal het accelereren, remmen en tot stilstand komen voor de inzittende en de begeleider als vloeiender en minder abrupt worden ervaren. Met name cliënten met een beperkte stabiliteit van de romp en het hoofd zullen hiervan profiteren. Vanaf begin volgend jaar zal de @Ease voorzien zijn van deze nieuwe begeleidersbediening.

**Onderdelenboek optimalisatie**

Het betrouwbaar leveren van losse onderdelen is een speerpunt binnen de dienstverlening naar onze klanten. Onze Online Spare Part Service vormt daarin een belangrijke schakel. Door de vele onderdelen is het steeds belangrijker geworden dat het juiste onderdeel snel gevonden kan worden. Daarom hebben we recent een zoekfunctie toegevoegd. Hiermee kan je specifiek voor een bepaald type rolstoel de juiste onderdelen zoeken. Meer gebruikersgemak dus!

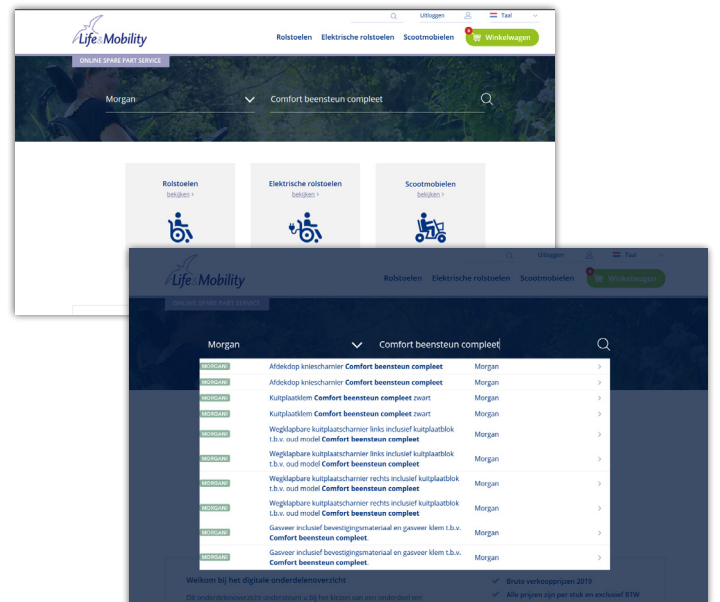



## Elektrische rolstoelen

### MID Lectus verlichting

De ophanging van de LED verlichting van de MID Lectus is gewijzigd van een starre naar een flexibele ophanging. Zodat bij mogelijk contact met een obstakel de verlichting en de bekapping hierdoor niet beschadigen. Dit is juist bij de MID Lectus relevant, omdat deze elektrische rolstoel met middenbesturing zeer geschikt is voor gebruik binnenshuis.

### Omni 2

Voor het aansturen van speciale voorzieningen op onze elektrische rolstoelen gebruiken we het Curtiss-Wright Omni systeem. Joysticks, Pico-buttons, kinbesturing en andere voorzieningen kunnen zo klant-specifiek worden aangesloten en geprogrammeerd. Sinds kort hebben we een verbeterde versie beschikbaar gemaakt: de Omni 2.

Bij de Omni 2 is ervoor gekozen om een fysieke scheiding toe te passen tussen het display en het invoergeedeelte voor de Special Input Device (SID). Door deze splitsing is het integreren en wegwerken van de verschillende speciale besturingen nog eenvoudiger geworden. Het display heeft nu dezelfde look-and-feel als de R-Net CJSM2.



### Lectus rugondersteuning verbeterd

Om de juiste laterale steun te kunnen bieden met de Lectus rugondersteuning is de rugplaat aangepast: de zijvlakken hebben een extra buiging gekregen. Door deze aangepaste vorm zullen de kussens meer laterale ondersteuning bieden. Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor de rompelotten en wordt het eenvoudiger om de juiste ondersteuning te geven.

### Afstandstop R-Net

Elektrische rolstoelen van Life & Mobility zijn nu uit te rusten met een Afstandstop. Deze Afstandstop is bedoeld om elektrische rolstoelen op afstand uit te kunnen uitschakelen. Dit is handig wanneer een begeleider, onafhankelijk van de gebruiker, de elektrische rolstoel wil laten stoppen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan instructie doeleinden en training. De begeleider bedient hiervoor een handzender die i.c.m. de ingebouwde ontvanger de stoel kan laten stoppen. Wanneer bediend zal de stoel afremmen tot stilstand met dezelfde vertraging als een door de gebruiker uitgevoerde remvertraging.

### Aanpassing dijbeensteun en heupsteun Lectus

Voor een juiste positionering van de dijbeensteun kan het nodig zijn om de steun boven de zitting te kunnen positioneren. Daarom heeft het scharnier van de dijbeen- en heupsteun een herontwerp gekregen. Deze nieuwe versie maakt het mogelijk om altijd de juiste laterale steun bij het zitkussen te geven.





## Convenanten uitgebreid

### Orthese op EVO Lectus en MID Lectus

Om een veilige productsamenstelling te kunnen waarborgen hebben we voor onze rolstoelen convenanten afgesloten met de meeste orthesebouwers in Nederland. Binnen het convenant zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de juiste montageset en het delen van informatie bij productwijzigingen.

Naast de convenanten voor de Match, Morgan en Leon zijn we nu ook ver gevorderd om deze af te sluiten voor de MID Lectus en de EVO Lectus. Per 1 Januari zijn deze producten als CE gemarkeerd en Crash-test safe te bestellen met de volgende ortheses: Orthototaal, RZ, Bert Stevens en Supportec. De benodigde informatie is te vinden op de prijslijsten.

EVO

Lectus

MID

Lectus

## Binnenkort

### Vaste Armlegger Versus

Om de eindgebruiker altijd een correct op maat ingesteld zitsysteem te bieden qua zitbreedte is de vaste armlegger van Versus aangepast. Deze heeft nu recht doorlopende zijkanen, zoals ook bekend van het Canto Nxt frame.

### Lectus armleggers

Om ook in hoog belaste gebruikssituaties de juiste arm-ondersteuning te kunnen bieden, is de kwaliteit van de armlegger parallelstang verbeterd. Deze wijziging zal begin 2020 worden geïntroduceerd.

## MDR update

Een korte MDR update: De invoering van de nieuwe MDR wetgeving komt dichterbij! Het wordt steeds duidelijker wat dit precies voor iedereen gaat betekenen. De overheid heeft een website gemaakt waarin puntsgewijs wordt aangegeven wat er per mei 2020 zal gaan veranderen. [Check deze link om te kijken of er voor u nog wat verandert!](#)

## Uit het assortiment

Spare parts:

- Spare parts Axi (de voorloper van de Axi2Go): zolang de voorraad strekt
- Zilvergrijze kappen TS120 (Solo 3) en QS4 (Solo 4)
- Comfort hoes met inco sleuven t.b.v. Kelvin Comfort zitelement

Match:

- Optie bagagehouder

